
	PEMAKAIAN SYRINGE PUMP		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	712 / SPO/ KEP / X / 2023	00	1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 01 Oktober 2023	Ditetapkan Oleh : Direktur RSUD Pariaman  <u>dr. Mutiara Islam, Sp. OG (K)</u> Nip. 19721219 200604 1 011	
PENGERTIAN	Syringe pump adalah alat untuk mengatur obat/ cairan agar dapat dimasukkan ke dalam tubuh secara perlahan-lahan melalui parenteral.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan petunjuk pemakaian kepada petugas agar dapat mengoperasikan alat sesuai prosedur yang berlaku.2. Tercapai kerja efektif dan efisien.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur No. 801 / 107 / PEL / II / 2023 tentang Kebijakan Pelayanan dan Asuhan Pasien		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Pasangkan syringe pump ke tiang standar infus.2. Hubungkan kabel power syringe pump ke sumber listrik (Perlu diperhatikan) cuci tangan dan gunakan handscoond sebelum melakukan tindakan.3. Sambungkan spuit dan extension tube ke pasien.4. Angkat clamp holder kemudian putar, taruh spuit pada posisi yang benar, jepit penarik dengan plunger clutch dan putar kembali clamp holder dan lepaskan secara perlahan.5. Hidupkan unit dengan menekan tombol power atau ON/ OFF.6. Atur kecepatan yang diperlukan dengan cara memutar flow rate.7. Tekan tombol start untuk memulai pemberian cairan obat yang dibutuhkan pasien.8. Untuk mengakhiri pengoperasian alat, tekan tombol power atau ON/ OFF.9. Lepaskan hubungan alat dari sumber listrik.10. Bersihkan unit dan kelengkapan alat lainnya kemudian cuci tangan		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none">1. IGD2. Instalasi Rawat Jalan3. Instalasi Rawat Inap		